

LINGETTES STERIMED



**Pack de 100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-immersibles.
Lingettes épaisses et douces en fibres 100% biodégradables.**

Dispositif médical Classe IIa

Indications

Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immersibles (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes échographiques, ...) et l'essuyage préliminaire des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant (protocole fourni sur demande).

Conditionnement

Format de lingette : 180 x 200mm.

Pack de 100 lingettes épaisses en fibres 100% biodégradables.

Carton de 12 packs.

Actifs

Ethanol (< 4%), Isopropanol (< 1%), Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7.

Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.
- Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.

Mode d'emploi

Soulever le dévidoir et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice. Tirer ensuite sur la première lingette. Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation.

Produit prêt à l'emploi à usage unique.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

A utiliser dans les 3 mois après ouverture.

Précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Réf : STERIMED

Fiche Technique. Version 9- 09/2016

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON

Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com